

ALUSTAT SKYSTIS KRAUJO STABDYMUI

SUDĖTIS: aliuminio chloridas 25 %, farmakologinio grynumo vanduo, mentolis, pagalbinės medžiagos.

PASKIRTIS

Gaminys ALUSTAT taikomas stomatologinio gydymo procese ir skirtas stabdyti nežymų kraujavimą.

Preparato sudėtyje esantis aliuminio chloridas sutraukia smulkius kapiliarus, dėl to sumažėja tinimas ir stabdomas nesmarkus kraujavimas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Sutinusias ar pažeistas švelniai patepti preparatu ALUSTAT suvilgytu vatos tamponu, nuskalauti švariu vandeniu. Jei reikia, pakartoti.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Dirgina burnos gleivinę, odą ir akis.

Jeigu preparatas pateko į akį, tučtuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Prarijus neskaitinkite vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.

Dirbant su produktu būtina naudoti vienkartinės pirštines ir apsauginius akinius.

SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 25 °C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės.

Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.

PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖ

10 g preparato buteliuke su lašintuvu