

Naudojimo instrukcija

Instrumentų valymo ir dezinfekcijos preparatas Be aldehydų



Gigasept® Instru AF

Sudėtis

Veikliosios medžiagos: guanidiniai, ketvirtiniai junginiai, aromatiniai alkoholiai.

100 g koncentrato yra: 35,0 g 1-fenoksi-2-propanolio, 16,5 g kokospropilendiamin biguanidindiacetato ir 2,5 g benzalkonijaus chlorido.

Kitos sudedamosios dalys: antikorozinės, aromatinės ir plaunančios medžiagos.

Savybės

Skaidrus, žalias, malonaus kvapo skystis. Koncentrato pH – 9,3. 1,5% ir 3% dūinių tirpalų pH – 8,5. Preparato sudėtyje nėra aldehydų, chloro ir fenolo. Veikia bakterijas (**tarp jų ir tuberkuliozės**), virusus (HBV, ŽIV, HCV, Adeno, Rota, Papova SV40), grybelius. Preparatas vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus.

Paskirtis

Preparatu valomi ir dezinfekuojami visi šilumai atsparūs ir jautrūs (išskyrus lanksčiuosius endoskopus) medicininiai instrumentai, pagaminti iš plastmasės, metalo, stiklo, porceliano, sintetinių medžiagų, gumos. Tinka naudoti instrumentų paruošiamajam plovimui prieš mašininę dezinfekciją. Netinka instrumentams pagamintiems iš geležies ir cinko. Preparatu galima valyti ir dezinfekuoti siurbimo prietaisų žarnas, skrandžio plovimo įrangą bei stomatologinius besisukančius instrumentus (pvz., plieno ir kieto metalo grąžtelius). Netinka karbido grąžtams (dažnai mirkant gali rūdyti), poliruotiems instrumentams (pasidengia apnašu).

Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro Įsakymą - Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo nr. v-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo, 2010 m. balandžio mėn. 20 d., medicinos prietaisai gali būti naudojami kirpyklose ir grožio salonuose.

Naudojimas

Koncentratas skiedžiamas vandeniu, tirpalai ruošiami taip:

3% - 30 ml Gigasept® Instru AF – 970 ml vandens

2% - 20 ml Gigasept® Instru AF – 980 ml vandens

1,5% - 15 ml Gigasept® Instru AF – 985 ml vandens

Instrumentų valymui ir dezinfekcijai naudojami tirpalai: 3% - 15min., 2% - 30min., 1,5% - 60 min.

Darbinis tirpalas veiksmingas 7 paras. Tirpalas keičiamas, jei pasikeičia jo spalva ar iškrinta nuosėdos. Plieno ir kieto metalo grąžteliai, dezinfekuojami ilgesnį laiką, negu nurodyta instrukcijoje, keičia spalvą. Instrumentai jei galima juos išardyti, išardomi ir mirkomi uždengtame inde. Instrumentų kanalai ir ertmės turi būti užpildyti tirpalu taip, kad nebūtų oro burbuliukų. Išdezinfekuoti instrumentai plaunami tekančiu arba steriliu vandeniu. Siurbimo prietaisų žarnos plaunamos tirpalu, o po to jame mirkomos nustatytą laiką.

- Ultragarso įrenginiuose dezinfekuojama 3% tirpalu 5min.

Darbo saugos nurodymai

Pateikiami saugos duomenų lape, kuris pridedamas įsigyjant preparatą.

Pakuotės

2 litrų polietileno buteliai

5 litrų polietileno kanistrai