




Kiilto Pro Erisan Des

Paviršiaus dezinfekantas

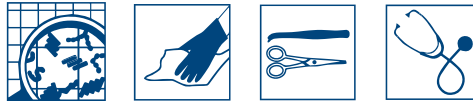

„Erisan Des“ sukurtas specialiems sveikatos priežiūros sektoriaus poreikiams: paviršių ir kūno skysčių dėmėms dezinfekuoti, tyrimų ir slaugos reikmenims valyti, įrangai ir instrumentams dezinfekuoti bei paviršiams dezinfekuoti ir dantų priežiūros įrangai bei instrumentams dezinfekuoti.

Naudojimas

Sveikatos priežiūros paviršiams valyti ir dezinfekuoti, naudoti kaip skalbimo dezinfekantą ultragarso skalbimo mašinose, kūno skysčių dėmėms dezinfekuoti.

Neinvazinių instrumentų ir reikmenų dezinfekcinis valymas (panardinimas). Taip pat gali būti naudojamas pirminei invazinių instrumentų dezinfekcijai atlikti, paskiau plaunant ir sterilizuojant.

Dantų priežiūros vienetų ir aparatų paviršiams dezinfekuoti ir instrumentams prižiūrėti (įskaitant valymą ultragarsu) laikantis higienos reikalavimų.

Panardinimui atlikti, paviršiams dezinfekuoti ir ultragarso vonioje naudoti skiedžiant 2–5 %.

Atlikti „Erisan Des“ bandymai jautrioms medžiagoms, kaip antai aliuminiui, kaučiukui ir įvairių rūšių plastikui, nustatyti.

Profesionaliam naudojimui skirta medicinos priemonė.

Produkto savybės

Veiksmingas greito veikimo dezinfekantas, pasižymintis geromis valymo savybėmis, itin atsparus organinei apkrovai. Kruopščiai parinktos veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas (ketvirtinė amonio druska), bis (3-aminopropil) dodecilaminas (akilaminas) ir fenoksietanolis. Dėl jų sinerginio poveikio pasiekiamas baktericidinis, virucidinis ir fungicidinis poveikis.

Dezinfekanto „Erisan Des“ veiksmingumas patvirtintas įvairiausiais bandymais (skliausteliuose pateiktas skiedimo bandymas):

EN 13727 (baktericidinis poveikis) 5 min. (1 %)

EN 13624 (mielicidinis) 5 min (1 %)

EN 14476 (virusas su apvalkalu) 2 min (1 %)

EN 14476 (graužikų norovirusas) 60 min (5 %)

EN 14561 (baktericidinis poveikis / panardinimas) 30 min (1 %)

EN 14562 (mielicidinis poveikis / panardinimas) 30 min (1 %)

EN 16615 (baktericidinis / mielicidinis poveikis) 1 min (2 %)

Taip pat atlikti bandymai:

EN 13697 (baktericidinis poveikis) 5 min (0,5 %)

EN 13697 (fungicidinis poveikis) 15 min (0,5 % mielių, 1 % grybų)

Naudojimo instrukcijos	Paruoškite skiedimui naudodami šaltą švarų vandenį. Medicinos inventoriui ir instrumentams dezinfekuoti naudokite mirkyti skirtą dubenį su dangteliu ir atsižvelkite į patartiną mirkymo laiką, kad būtų išvengta medžiagų pažeidimo. Naują skiedinį paruoškite kartą ar dukart per savaitę, priklausomai nuo skysčio suteršimo.			
	Nepanaudotą švarų tirpalą ir skystį „One System Basic“ servetėlių dalytuve galima naudoti keturias savaites.			
Pastaba	Patartina plauti apdorotus paviršius kasdien / kartą per savaitę vandeniu arba naudoti švelnų nejoninį valomąjį ploviklį. Esant Clostridium Difficile epidemijoms rekomenduojama naudoti „Erisan Oxy+“ dezinfekantą.			
Sudėtis	Sudėtinė dalis		Poveikis	
	Didecildimetilamonio chloridas	5-15%	Biocidinis produktas	
	2-fenoksietanolis	5-15 %	Biocidinis produktas	
	Izopropanolis	<5%	Biocidinis produktas	
	Nejoniniai surfaktantai	< 5%	Valymo savybės	
	Trietanolaminas	< 5%		
	Dietilo eteris	<1%		
Produkto pH	11.0 šarminis			
Tirpalo pH	10.0 silpnai šarminis			
Laikymas	Kambario temperatūroje, tinkamumo vartoti laikas – 3 metai. Negalima užšaldyti.			
Gamybos šalis	SUOMIJA			
Naudotojo ir aplinkos sauga	Apie su „Erisan Des“ dezinfekantu susijusius sunkių padarinių sukėlusius incidentus reikia pranešti asiakaspalvelu@kiilto.com ir vietinei medicinos priemonių įstaigai.			
Pakuotės dydis / produkto kodas	Pardavimų skyrius	Prekės kodas	GTIN	GTIN (pardavimų skyrius)
	3 x 3 l	8127	6417964081275	6417964482416
	12 x 500 ml	8126	6417964081268	6417964482423
Papildoma informacija	Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiilto.lt arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com .			