

# schülke -†



Medicininų instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonė. Be aldehydų.

## gigasept® instru AF

### Mūsų pliusai:

- be aldehydų
- malonus kvapas
- labai geros valymo savybės
- labai platus antimikrobinis poveikis
- trumpas ekspozicijos laikas ultragarsinėje vonelėje

### Panaudojimo sritys

Tinka šilumai atsparių ir termolabilių (išskyrus lanksčiuosius endoskopus) instrumentų rankiniam valymui ir dezinfekcijai. Dėka labai gerų valymo savybių, ypačiai ultragarsinėse vonelėse ir plataus antimikrobinio poveikio, Gigasept® instru AF yra puikus pasirinkimas medicininių instrumentų rankiniam valymui ir dezinfekcijai.

### Naudojimo instrukcija

Gigasept® instru AF yra koncentruota priemonė, kuri skiedžiama šaltu vandeniu.

Naudojama Darbinių tirpalų koncentracija yra nuo 1.5 % – 4 %. 1 litras 3 % darbinio tirpalo yra gaminamas sekančiai: į 970 ml vandens reikia pilti 30 ml Gigasept® instru AF koncentrato.

Panaudotus instrumentus merkite į pagamintą Gigasept® instru AF darbinį tirpalą. Įsitikinkite kad visi instrumento paviršiai ir ertmės būtų paskandinti tirpale. Praėjus reikiamam kontakto laikui, instrumentus gerai nuskalaukite po tekančiu vandeniu. Visada vadovaukitės instrumentų gamintojo rekomendacijomis apie tai kaip juos plauti ir dezinfekuoti.

Pagaminto darbinio tirpalo galiojimo laikas yra 7 dienos.

Gigasept® instru AF yra tinkamas naudoti ultragarsinėse vonelėse. Tyrimai parodė, kad Gigasept® instru AF valymo savybės išryškėja po kelių sekundžių. Darbinis tirpalas negali viršyti 40 °C.

### Mikrobiologinis efektyvumas

| Efektyvumas                                                                                                                                   | Koncentracija       | Kontakto laikas               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>baktericidinis, levirucidinis, mykobaktericidinis</b><br>pagal VAH<br>EN 13727, EN 14561<br>EN 13624, EN 14562<br>EN 14348, EN 14563       | 3 %<br>2 %<br>1.5 % | 15 min.<br>30 min.<br>60 min. |
| <b>Ultragarsinė vonelė</b><br>(baktericidinis, levirucidinis, mykobaktericidinis)                                                             | 3 %                 | 5 min.                        |
| <b>inkapsuluoti virusai</b><br>(jsk. ŽIV, HBV, HCV)<br>iPagal DVV (Vokietijos kovos su virusinėmis ligomis asociacija) / RKI gairės 12 / 2014 | 1 %                 | 5 min.                        |
| <b>Rota virusas</b><br>su tarša<br>pagal DVV / RKI                                                                                            | 0.5 %               | 5 min.                        |
| <b>Adeno virusas</b><br>iPagal DVV (Vokietijos kovos su virusinėmis ligomis asociacija) / RKI gairės 12 / 2014                                | 4 %                 | 60 min.                       |
| <b>Polyoma SV40</b><br>iPagal DVV (Vokietijos kovos su virusinėmis ligomis asociacija) / RKI gairės 12 / 2014                                 | 4 %                 | 60 min.                       |

### Informacija apie produktą

Sudėtis:

100 g priemonės yra šios veikliosios medžiagos: 15,6 g kokospropileno diaminoguanido diacetato, 35 g fenoksipropanolio, 2,5 g benzalkoniumchlorido. Kitos sudedamosios dalys 5 – 15 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, aromatinės medžiagos.

### Cheminės ir fizikinės savybės

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Spalva    | žalia                            |
| Tankis    | ~ 0.99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C |
| Forma     | skystis                          |
| pH        | ~ 9 / 20 °C / koncentrato        |
| Klampumas | ~ 30 mPa*s / 20 °C               |

# gigasept® instru AF

## Specialūs patarimai

**Prieš naudojimą perskaitykite produkto aprašymą ir naudojimo instrukciją.**

Maišant Gigasept® instru AF su kitais produktais, ypač su aldehidais, galimas išblukimas, spalvos pasikeitimas ir mikrobiologinio efektyvumo susilpnėjimas. Nemaišyti su jokiais kitais produktais. Prieš naudojant Gigasept® instru AF pirmą kartą, rekomenduojama gerai išskalauti mirkymo vones ir matavimo indelius.

Nenaudokite Gigasept® instru AF jei pasibaigęs galiojimo laikas.

## Talpos

| Produktas               | Antrinė pakuotė | Kodas  |
|-------------------------|-----------------|--------|
| gigasept® instru AF 2 l | 5 vnt. / dėžėje | 107427 |
| gigasept® instru AF 5 l | 1 vnt.          | 107428 |

## Aplinkosauginė informacija

Schülke produktus gamina pasitelkdama ekonomiškus, pažangius, saugius ir aplinką tausojančius gamybos procesus, išlaikydama aukštus kokybės standartus.

## Papildoma informacija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, maloniai prašome aplankyti mūsų internetinį puslapį:  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

## Priedai

| Priedai                          | Kodas  |
|----------------------------------|--------|
| užsukamas dozatorius 2 l talpoms | 183401 |
| menzūra 500 ml                   | 136101 |
| menzūra 50 ml                    | 136102 |

**schülke** →

**APITERAPIJA**

### Gamintojas:

Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Vokietija  
Tel.: +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Faks.: +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

### Įgaliotas atstovas Lietuvoje:

UAB "APITERAPIJA"  
Daugėlišio g. 32-301,  
LT-09300 Vilnius, Lietuva  
Tel.: 8 5 2450 415, faksas: 8 5  
2706 201  
El. p. adresas:  
[info@apiterapija.lt](mailto:info@apiterapija.lt)

